

Attention: Portez une protection de la peau et des yeux conçue pour la manipulation de matières dangereuses habituelles. Faites attention à tout moment pour éviter les déversements.

Ne travaillez jamais sur un équipement connecté à une alimentation sous tension. Coupez l'alimentation en débranchant l'alimentation principale de l'unité avant d'effectuer toute procédure.

Utilisez uniquement le nettoyeur CleanStream pour entretenir les lignes de vide du système. N'utilisez pas de javellisant au chlore ou de solutions d'hypochlorite de sodium, car ces produits peuvent endommager l'équipement.

Remplacement de l'assemblage de vidange - Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour remplacer l'assemblage de vidange. Assemblez les raccords dans l'ordre indiqué.

1. Retirez l'assemblage de vidange existant, y compris l'adaptateur installé (712810002).

Attention: Ne serrez pas trop la vis (H4176) (environ 8 po-lb).

2. Remplacez le joint torique et l'adaptateur en les fixant avec la vis (H4176)
3. Utilisez le clip (H4056) pour fixer l'assemblage de vidange à l'adaptateur.

Remarque: Lecoude à 90° (H4052) peut être utilisé pour remplacer le coude à 45° en fonction des exigences de l'installation.

